

راهنمای سریع شناسایی ملزومات مصرفی پزشکی

رنگ‌ها، سایزها و کاربردهای رایج


✓ شناسایی صحیح ملزومات مصرفی، انتخاب مناسب و ایمن و مراقبت بهتر از بیمار را تضمین می‌کند.

1 انواع آنژیوت (IV Cannula)



هرچه عدد Gauge کمتر باشد، قطر آنژیوت بیشتر است و سرعت جریان بالاتر خواهد بود.

کاربرد رنگ‌ها در شناسایی سریع سایز

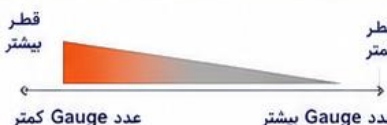

14G	16G	18G	20G	22G	24G	26G*
نارنجی	خاکستری	سبز	صورتی	آبی	زرد	بنفش
دسترس‌ی وریدی با جریان بالا	تزریق سریع مایعات و خون	خون و مایعات کاربردهای رایج	تزریق وریدی معمول	وریدهای کوچک‌تر، سالمندان و کودکان	وریدهای بسیار، اطفال و نوزادان	در برخی برندها، بسیار ظریف

* سایز 26G در همه شرکت‌ها تولید نمی‌شود و ممکن است موجود نباشد.

2 انواع سوند فولی (Foley Catheter)

(Fr)	6 Fr	8 Fr	10 Fr	12 Fr	14 Fr	16 Fr	18 Fr	20 Fr	22 Fr	24 Fr
تصویر										
قطر تقریبی (mm)	2.0	2.7	3.3	4.0	4.7	5.3	6.0	6.7	7.3	8.0
کاربرد رایج	کاربردهای خاص اطفال بسیار کوچک	اطفال	اطفال کودکان	کودکان و موارد خاص	بزرگسالان (سایزهای رایج)				موارد خاص با نیاز به قطر بیشتر	

و واحد اندازه‌گیری قطر خارجی سوند است. $3\text{French} \approx 0.33$ به میلی‌متر.

(French) چیست؟

رنگ‌بندی سوندهای فولی در شرکت‌های مختلف متفاوت است؛ بنابراین بنابراین سایز درج‌شده روی محصول ملاک است، نه رنگ آن.

3 انواع ایروی دهانی - حلقی (Guedel Airway)

نکات مهم

اندازه ایروی بر اساس رنگ و و اندازه بیمار انتخاب شود.

طول ایروی باید از گوشه لب تا زاویه فک بیمار تقریباً برابر باشد.

در انتخاب سایز، آناتومی بیمار و وضعیت بالینی در نظر گرفته شود.

سایز	000	00	0	1	2	3	4	5
رنگ رایج	صورتی	آبی	مشکی	سفید	سبز	زرد	قرمز	آبی روشن
تصویر								

★ رنگ‌بندی ممکن است با توجه به شرکت سازنده متفاوت باشد؛ سایز درج‌شده روی محصول و دستورالعمل سازنده ملاک است.

چرا شناخت سایز مهم است؟



افزایش ایمنی بیمار
ارتقاء کیفیت درمان



کاهش عوارض و آسیب‌ها
انتخاب سریع و دقیق

نکات عمومی

- ✓ قبل از مصرف، بسته‌بندی و تاریخ انقضا را بررسی کنید.
- ✓ از محصولات استریل و سالم استفاده کنید.
- ✓ در صورت عدم اطمینان، از دستورالعمل سازنده پیروی کنید.

هشدار



استفاده از سایز نامناسب هر یک از این ملزومات می‌تواند موجب کسلی کاهش التریخشی درمان، آسیب آسیب به بیمار و بروز عوارض جدی شود.

